

CORALENE®

Schwangerschaftstest zum Nachweis des Hormons hCG im Urin

Nachweisgrenze: 20 mIU/mL Urin

Schwanger oder nicht? Diese Frage beantwortet der CORALENE® Schwangerschaftstest in nur wenigen Minuten. Bereits am ersten Tag nach Ausbleiben der Regel zu jeder Zeit durchführbar.

- Öffnen Sie die Aluminiumhülle unmittelbar vor der Durchführung des Tests.
- Ziehen Sie die Schutzkappe ab.
- Fassen Sie den Test-Stick am Griff an, und halten Sie die Testspitze für einige Sekunden in den Urinstrahl. Alternativ können Sie den Urin auch in einem Becher auffangen und die Testspitze für etwa 5 Sekunden in den Urin tauchen.
- Schieben Sie die Schutzkappe nun wieder auf den Test und legen Sie ihn auf eine ebene Fläche.
- Bei genauer Betrachtung sehen Sie nach einigen Sekunden die Feuchtigkeit im Testfenster entlanglaufen.
- Lesen Sie das Ergebnis etwa 2-5 Minuten nach der Anwendung ab. Bitte beachten Sie, dass das Ergebnis spätestens nach 10 Minuten abgelesen werden sollte. Eine später auftretende Testlinie ist nicht aussagefähig.

Leistung

Zuverlässigkeit

Der CORALENE® Schwangerschaftstest besitzt eine wissenschaftlich nachgewiesene Genauigkeit von >99%.

Testverfahren

Schon in der Frühphase der Schwangerschaft beginnt der Körper mit der Produktion des Hormons hCG (humanes Chorion-Gonadotropin). Dieses Hormon wird auch über den Urin ausgeschieden und kann mit dem CORALENE® Schwangerschaftstest nachgewiesen werden.

Medikamente

Im Allgemeinen hat die Einnahme von Medikamenten keinen Einfluß auf das Testergebnis. Ausnahme sind lediglich Arzneimittel, die hCG enthalten. Sie können das Ergebnis verfälschen.


Auswertung

Schwanger:

Sowohl im eckigen Kontrollfenster, als auch im runden Testfenster wird eine Linie sichtbar.

Nicht schwanger:

Nur im eckigen Kontrollfenster wird eine Linie sichtbar.

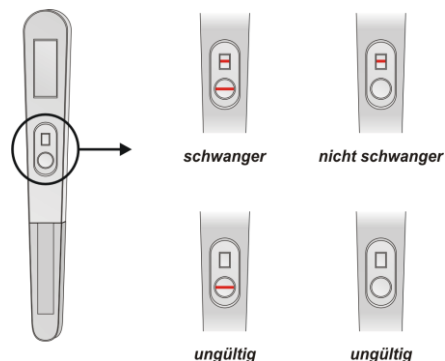

Hinweis

Ist etwa 5 Minuten nach der Anwendung keine Linie sichtbar, oder nur eine Linie im runden Fenster, so ist das Ergebnis ungültig. Lesen Sie hierzu die Hinweise zur "Sicherheit" unten in dieser Anleitung.

Beide Linien können unterschiedlich stark gefärbt und breit sein. Dies ist normal! Sollten Sie bei der Auswertung nach 2-5 Minuten noch unsicher sein, lesen Sie den Test nach weiteren 5 Minuten nochmals ab. Häufig färbt sich die Linie im runden Fenster in dieser Zeit noch nach, so dass ein Auswerten des Tests einfacher wird.

Sicherheit

Die Zuverlässigkeit des CORALENE® Schwangerschaftstest ist besonders hoch. Dennoch kann in seltenen Fällen das Ergebnis nicht eindeutig, bzw. schwer zu interpretieren sein.

Sollte die Testlinie beispielsweise besonders schwach sichtbar sein, dann führen Sie bitte nach 3 Tagen einen neuen Test durch, und verwenden Sie dabei Morgenurin. Wenn Sie schwanger sind, dann werden 2 deutlich sichtbare Linien erscheinen. Suchen Sie bei einem positiven Ergebnis bitte unbedingt Ihren Arzt auf.

Wenn das Testergebnis "nicht schwanger" lautet, und Sie Ihre Periode dennoch nicht bekommen, empfehlen wir nach 3 Tagen einen weiteren Test durchzuführen. Fällt auch dieser Test negativ aus, und Ihre Periode bleibt weiterhin aus, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Bei einem positiven Testergebnis setzen Sie sich bitte gleich mit Ihrem Arzt in Verbindung. Er wird Sie über wichtige Hinweise und Ratschläge für einen optimalen Verlauf der Schwangerschaft informieren.

Hinweise

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!**
- Test nicht einnehmen!**
- Test nicht benutzen, wenn der Verpackungsbeutel beschädigt ist!**
- Test nicht nach Ablauf der Haltbarkeit benutzen!**
- Benutzten Test mit Hausabfall entsorgen!**
- Zusätzlich benötigte Materialien: eine Uhr und ggf. ein sauberer und trockener Becher zum Sammeln des Urins.**
- Bei einigen eingesetzten Materialien (z.B. Antikörper) handelt es sich um potentiell infektiöse Materialien, von denen jedoch keine Gefahr ausgeht, wenn der Test gemäß der Gebrauchsanleitung verwendet wird.**
- Nur zum Einmalgebrauch**

Technische Daten:

Produktname: CORALENE® Schwangerschaftstest
 Wirksame Bestandteile: Monoklonale Antikörper gegen hCG
 Untersuchungsmaterial: Frischer, menschlicher Urin; keine Vorbehandlung; keine Aufbewahrung
 Anwendungszweck: In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung
 Leistungsmerkmale: Untere Nachweisgrenze: 20 mIU hCG/mL
 Messbereich: 20 mIU / mL – 24 000 IU/mL
 Diagnostische Sensitivität: >99%
 Diagnostische Spezifität: >99%
 Aufbewahrung: In Originalverpackung bei Raumtemperatur (+2 bis +30°C).
 Nachweismethode: Nach Öffnen des Verpackungsbeutels sollte der Test sofort durchgeführt werden. Der auf den Test aufgetragene Urin wird durch Kapillarkräfte in den Test aufgesogen. Bei Anwesenheit von hCG im Urin kommt es zu einer immunologischen Reaktion zwischen dem hCG und den im Test befindlichen Antikörpern unter Ausbildung einer roten Linie (Testlinie). Andere Antikörper bilden die Kontrolllinie, die die ordnungsgemäße Funktion des Tests anzeigen. Die Methode wird als Immunchromatographie bezeichnet.

Version: 19.1.2011/ rb

CE 0123

INTEX® Diagnostika GmbH

Erlenstr. 50
 CH-4058 Basel
 Tel. (0041) 61 554 24 41
 Fax (0041) 61 556 14 45
 service.ch@intex-diagnostika.com

IDSAN® AG Deutschland

Hegenheimerstr. 3
 DE-79576 Weil am Rhein
 Tel. (0049) 7621 940 90 80
 Fax (0049) 7621 940 90 85
 idsan-deutschland@online.de

IDSAN® Kft.

Árpád u. 3/b. fdsz. 1
 HU-1195 Budapest
 Tel. (0036) 1 357 65 98
 Fax (0036) 1 357 65 99
 intex@t-online.hu